



Aus unserem Produktsortiment

GEFATEX®

GEFA Matratzenprogramm

GEFA Lagerung

GEFA Kissen und Decken

GEFA Kind und Klinik

GEFA OP und Lagerung

GEFA Duschvorhänge und -zubehör

Safetytex©

nowetex®

Gebrauchsanweisung

Wichtige Hinweise zur richtigen Handhabung von GEFATEX® Tape GT 82 und GT 96 LF

GEFA
Hygiene-Systeme GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen mit

- ✓ Experten
- ✓ Sachverstand
- ✓ Wissenschaftlern
- ✓ eigener Produktentwicklung
- ✓ Know How
- ✓ eigener Produktion

Wichtige Hinweise zur richtigen Handhabung von GEFATEX® Tape GT 82 und GT 96 LF


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir bitten Sie Folgendes zu beachten:

- Das Objekt sollte ganzflächig umlaufend neu beklebt werden. Flicken bieten keinen dauerhaften Hygiene-Schutz!
- Auszubessernde oder zu beklebende Flächen werden vorzugsweise mit einer Seifenlauge oder Wasser mit Tensidzusatz (Spülmittel) gereinigt und anschließend mit klarem Wasser seifenfrei abgewischt. Nach dem Trocknen kann verklebt werden.
- Fassen Sie zum Auflegen des Tapes dieses mit beiden Händen an. Dieses sollte im Vorfeld exakt zurechtgeschnitten werden, da ein Abziehen des einmal verklebten Tapes nahezu unmöglich ist. Wir empfehlen vor dem Zurechtschneiden des Schutzbezugs eine Schablone aus Papier anzufertigen.
- Lösen Sie zunächst nur einen schmalen Streifen des rückwärtigen Schutzpapiers. Legen Sie dann eine Kante zum Verkleben an das zu beklebende Objekt an. Ziehen Sie nun die Schutzfolie gleichmäßig und langsam ab.
- Drücken Sie den Schutzbezug mit einer Schaumstoffrolle an. Hierzu haben sich Rollen zum Anstreichen bewährt.
- Planen Sie zum überlappenden Verkleben der Ecken und Kanten ausreichend Material ein, mindestens 5 mm, besser 10 mm.
- Das Tape sollte nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt werden. Teile, die im Wasser genutzt werden, z.B. für die Bewegungstherapie in Wanne und Schwimmbad, können nicht beklebt werden. Ein feuchtes Abwischen stellt kein Problem dar.
- Vor der nächsten Verwendung muss das beklebte Objekt 24 Stunden ruhen. Werden Produkte beklebt, die mit Klein- und/oder Kleinstkindern in Berührung kommen, ist eine Trocknungszeit von 72 Stunden erforderlich. Bei einem Einsatz in Wärmebetten oder Inkubatoren muss mit uns im Vorfeld Rücksprache gehalten werden.
- Das fertige Produkt kann nach der Trocknungszeit problemlos mit jedem VAH/DGHM gelisteten Desinfektionsmittel gereinigt werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass farbige Desinfektionsmittel das GEFATEX® Tape verfärben. Diese Verfärbungen können nicht mehr entfernt werden.

Kleben von Ecken/Kanten

Beim Kleben von Ecken/Kanten steht die Klebekraft der Rückdehnung des Materials entgegen. Je höher die Überdehnung des GEFATEX® Tapes, desto mehr überwiegt die Rückdehnung. Um dem entgegenzuwirken und um Ekelsohren vorzubeugen, empfehlen wir, einen Streifen GEFATEX® Tape quer zur Falz zu kleben:

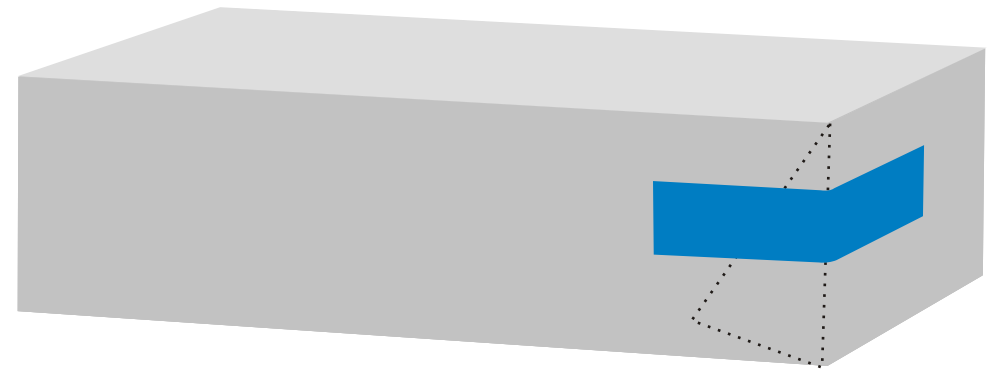

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Produkten. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr GEFA - Team